


# RESPIRADOR EVITA 2

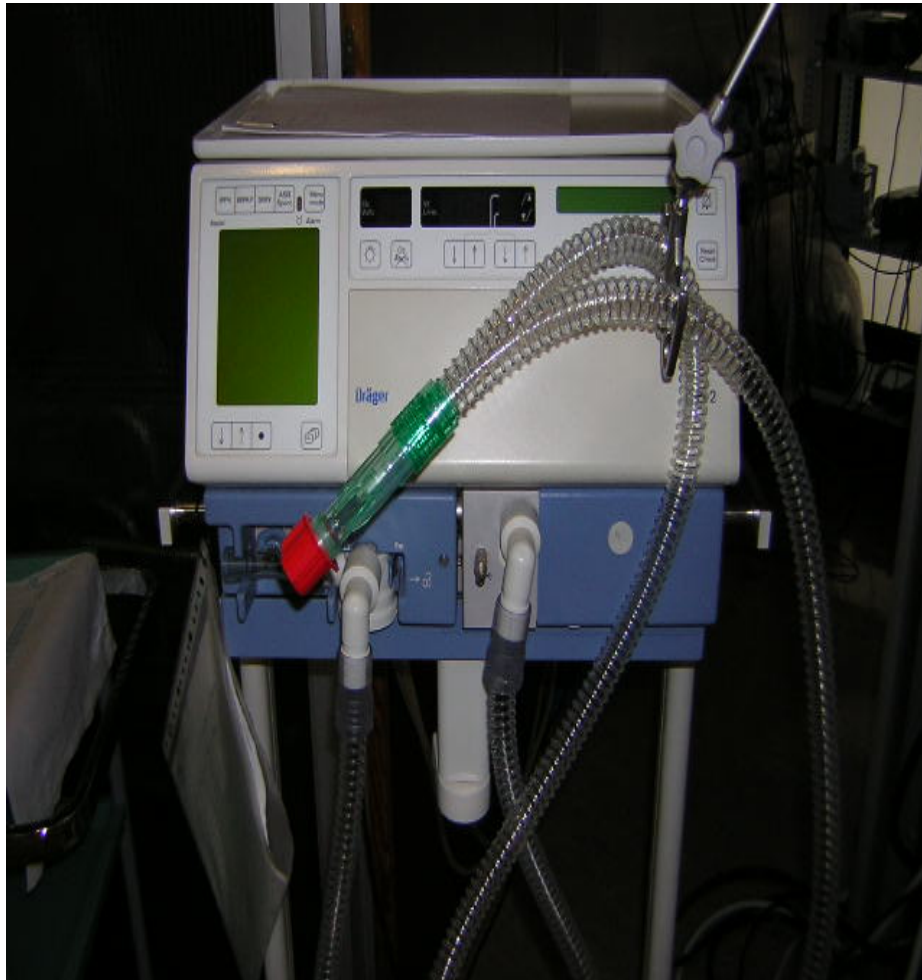

# PIEZAS DEL EVITA



**VALVULA DESMONTADA**

# PIEZAS DEL RESPIRADOR




# DESMONTAR

QUITAR  
TUBULADURA Y  
TIRAR



DESPLAZAR EL SENSOR DE  
FLUJO HACIA LA  
IZQUIERDA

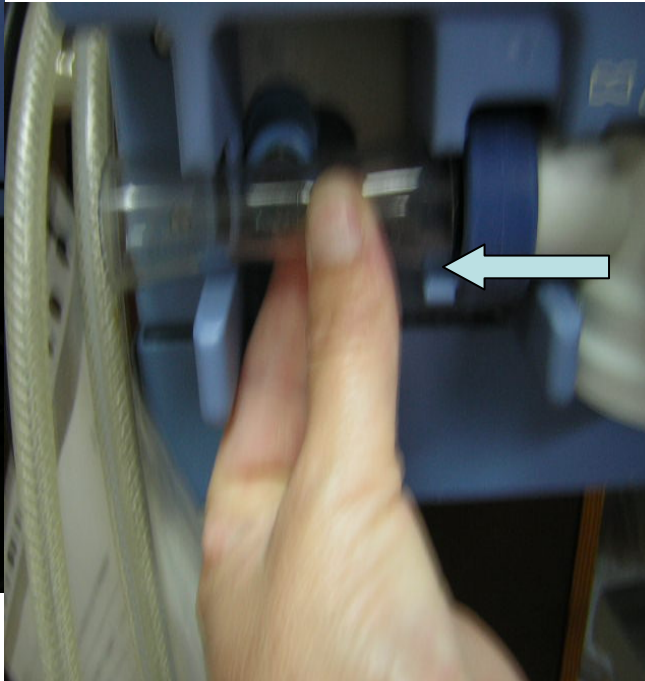

SACAR ACCIONANDO  
HACIA DELANTE



# DESMONTAR

- ACCIONAR LA PESTAÑA , A LA IZQUIERDA DE LA VALVULA ESPIRATORIA
- SACAR LA VALVULA ESPIRATORIA
- DESMONTARLA



# DESMONTAR

- QUITAR EL FILTRO QUE ESTA EN LA PARTE DE ATRAS



# LIMPIAR

- LIMPIAR EL RESPIRADOR , INCLUYENDO CABLE ELECTRICO Y MANGUERAS DE AIRE Y OXIGENO,,CON UN TRAPO HUMEDO
- LAVAR EL FILTRO DE LA PARTE DE TRASERA Y DEJAR SECAR



## LIMPIAR

- DESMONTAR LA VALVULA ESPIRATORIA Y SUMERGIR EN INSTRUNET LIQUIDO, 10 MINUTOS, SECAR MUY BIEN Y MANDAR A ESTERILIZACION
- EL SENSOR DE FLUJO, LIMPIAR POR FUERA Y NO SUMERGIR




## MONTAR EL RESPIRADOR

- PONER SENSOR DE FLUJO, DEJANDOLO EN LA POSICION DE LA DERECHA
- MONTAR LA VALVULA ESPIRATORIA



## MONTAR EL RESPIRADOR

- PONER LA VALVULA ESPIRATORIA
- ACCIONAR HACIA LA DERECHA EL SENSOR DE FLUJO, PARA QUE AJUSTE EN LA VALVULA ESPIRATORIA

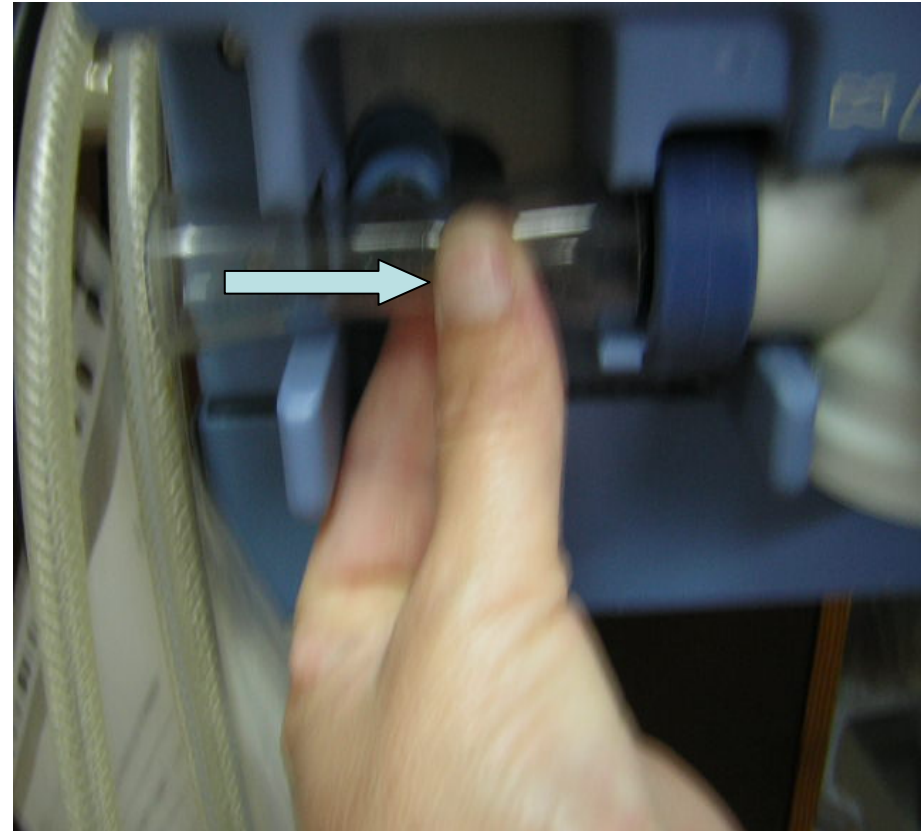

## MONTAR EL RESPIRADOR

- PONER LA TUBULADURA
- PONER EL FILTRO NUEVO



# CALIBRAR

- ENCHUFAR A LA RED ELECTRICA
- ENCHUFAR LAS MANGUERAS DE AIRE Y OXIGENO




## CALIBRAR

- ENCENDER EL RESPIRADOR
- ESTE RESPIRADOR, NO MEMORIZA LA CALIBRACION, POR LO QUE ES NECESARIO COMPROBAR DE NUEVO CUANDO SE PONGA EN EL PACIENTE



# CALIBRACION

- SIEMPRE SE CALIBRA EN EL MODO DE IPPV

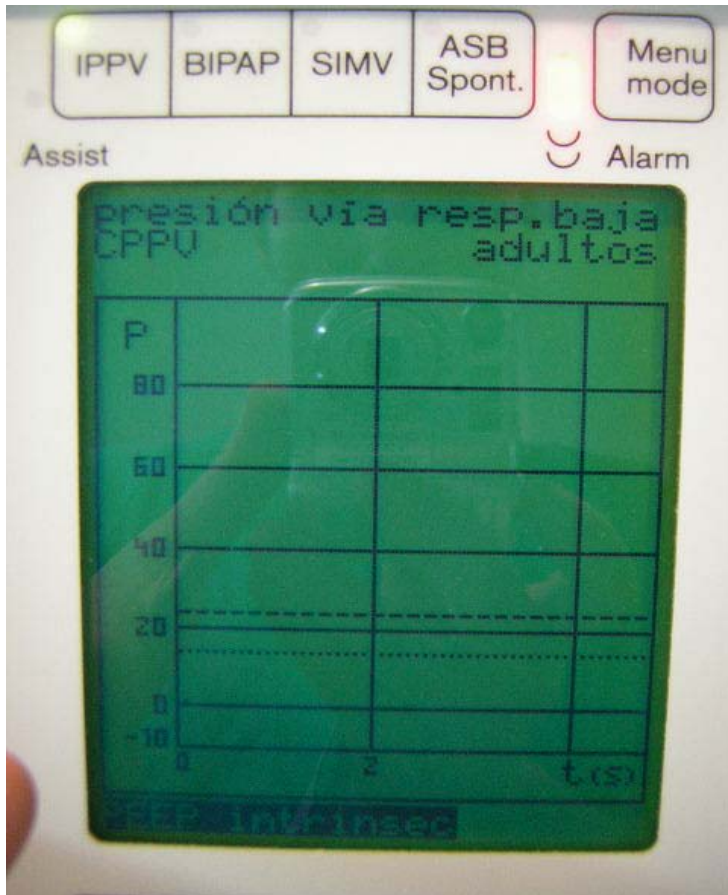

# CALIBRACION

- QUITAR EL TAPON ROJO Y RESERVAR
- PONER TODOS LOS BOTONES EN EL PUNTO COLOR VERDE
- ,SUELEN SER LO VALORES NORMALES



# CALIBRACION



- CALIBRACION DE OXIGENO-

. PULSAR BOTON  HASTA QUE LA LUZ SE QUEDE FIJA



# CALIBRACION

- EMPIEZA A CALIBRAR EL OXIGENO

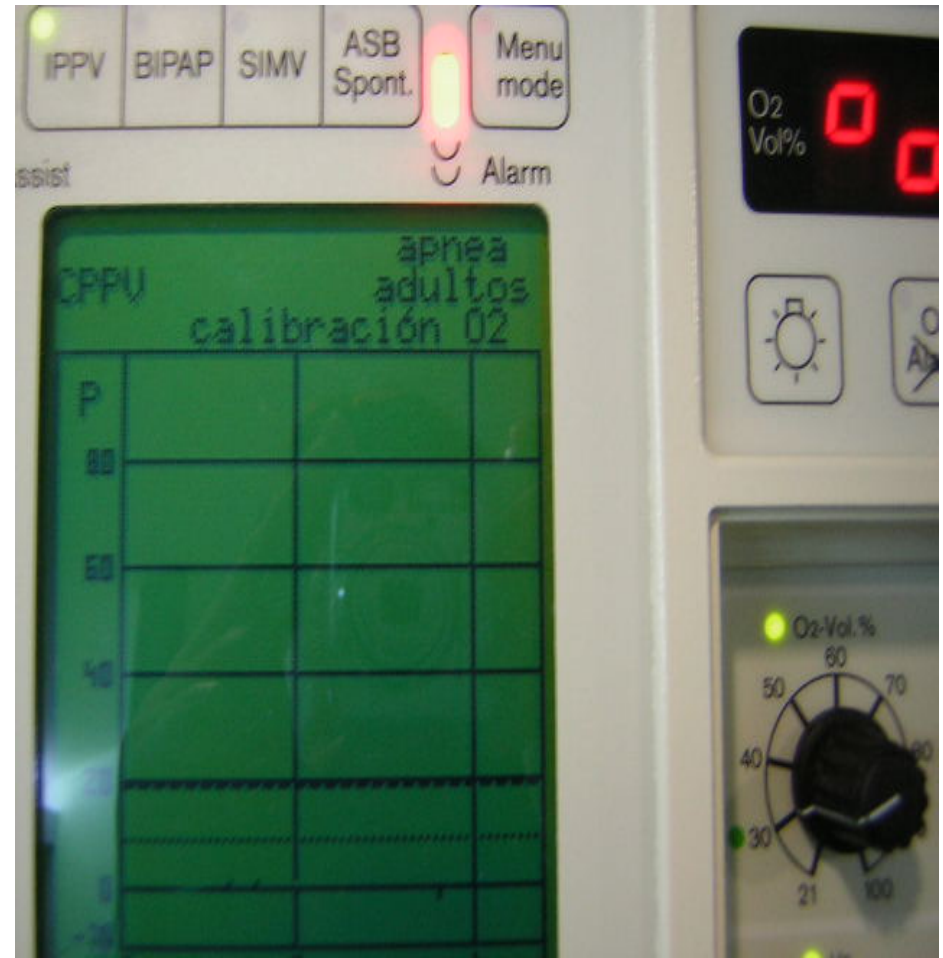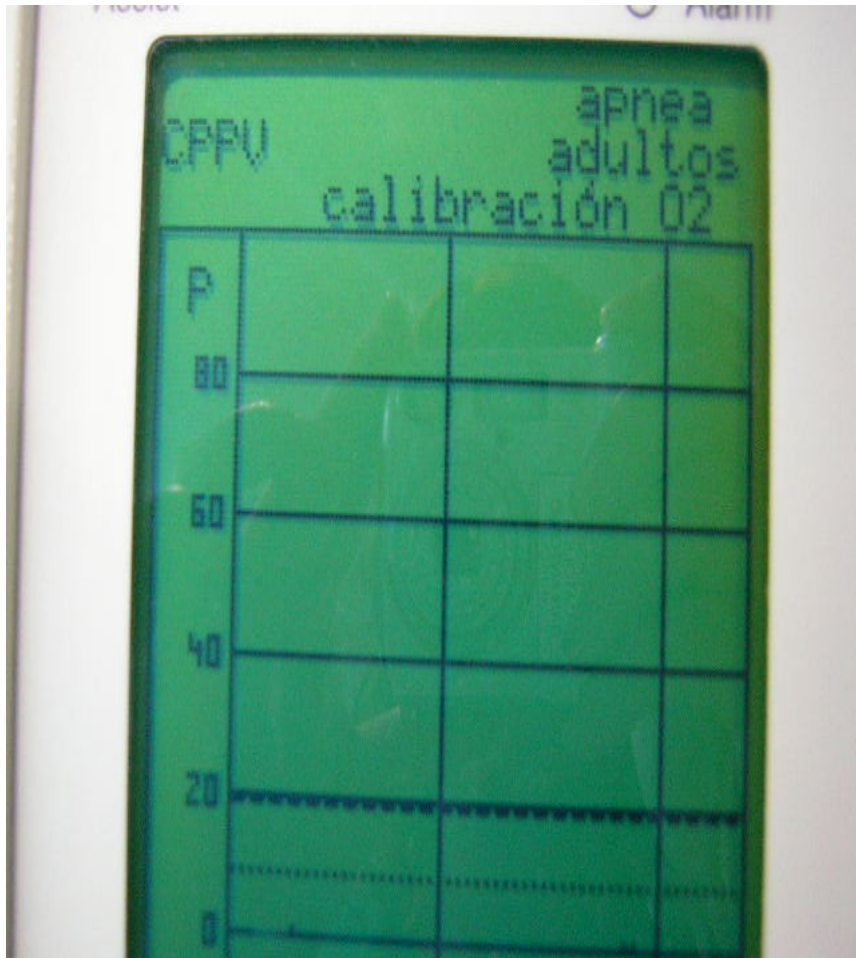

## CALIBRACION

- CUANDO HA TERMINADO DE CALIBRAR EL OXIGENO EN LA PANTALLA SE VE EL VALOR QUE SE LA HA PEDIDO




# CALIBRACION

- CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO-

- PLSAR BOTON  HASTA QUE LA LUZ SE QUEDE FIJA

- EN LA PANTALLA DE LA IZQUIERDA APARECE, CALIBRANDO  
SENSOR DE FLUJO

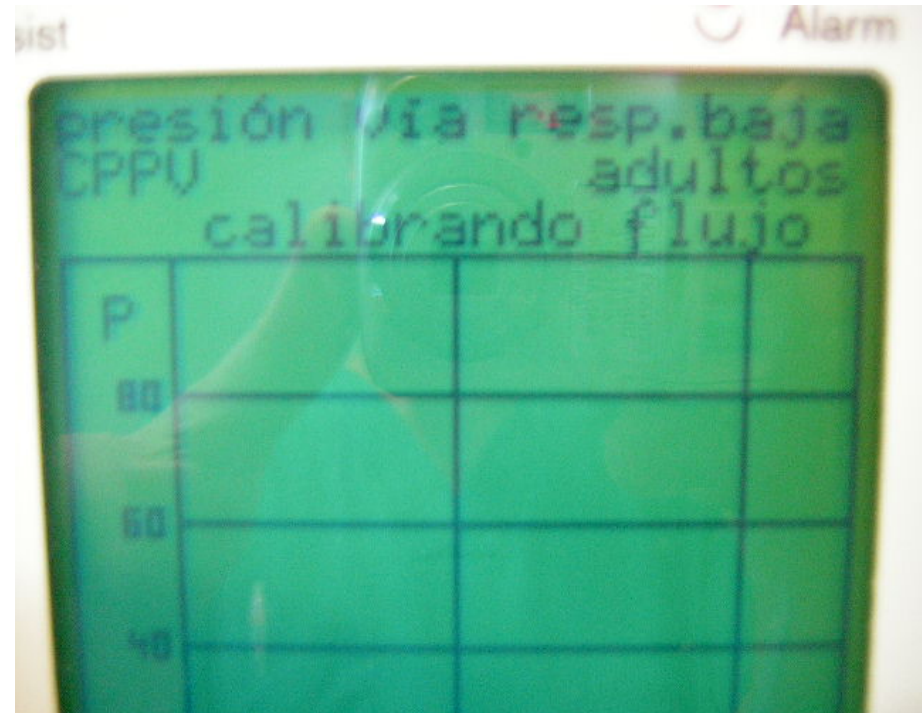

## CALIBRACION

- APUNTAR LAS HORAS EN LA HOJA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL RESPIRADOR
- SE ENCUENTRAN EN LA PARTE DE ATRÁS DEL RESPIRADOR

