

# BIPAP VISION




**FILTRO**



## PIEZAS DE LA BIPAP



## CONEXIÓN EN (T) SE QUITA

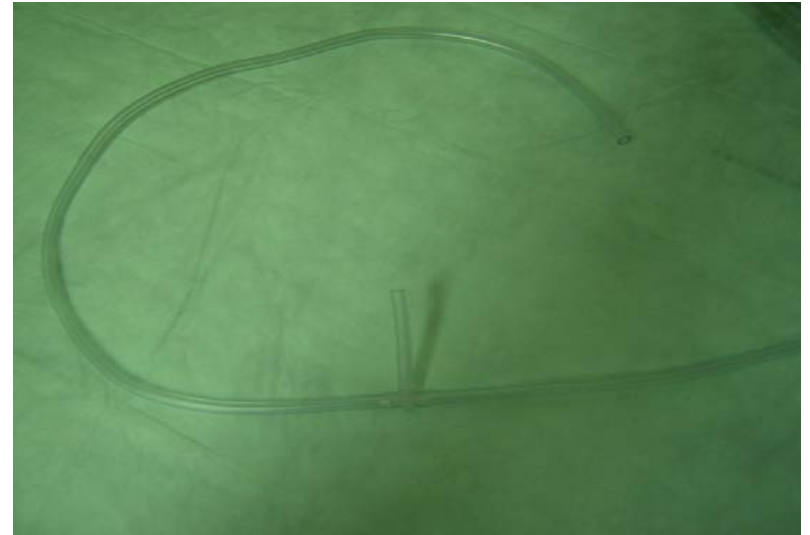

## TUBULADURA SIN LA CONEXIÓN EN (T)



## APÓSITO PARA LA NARIZ




- **Visión montada**
- **Enchufar corriente eléctrica**
- **Conectar alargadera de oxigeno**
- **Encender**





- La visión hace el autotest
- Pulsar el botón del orificio espiratorio

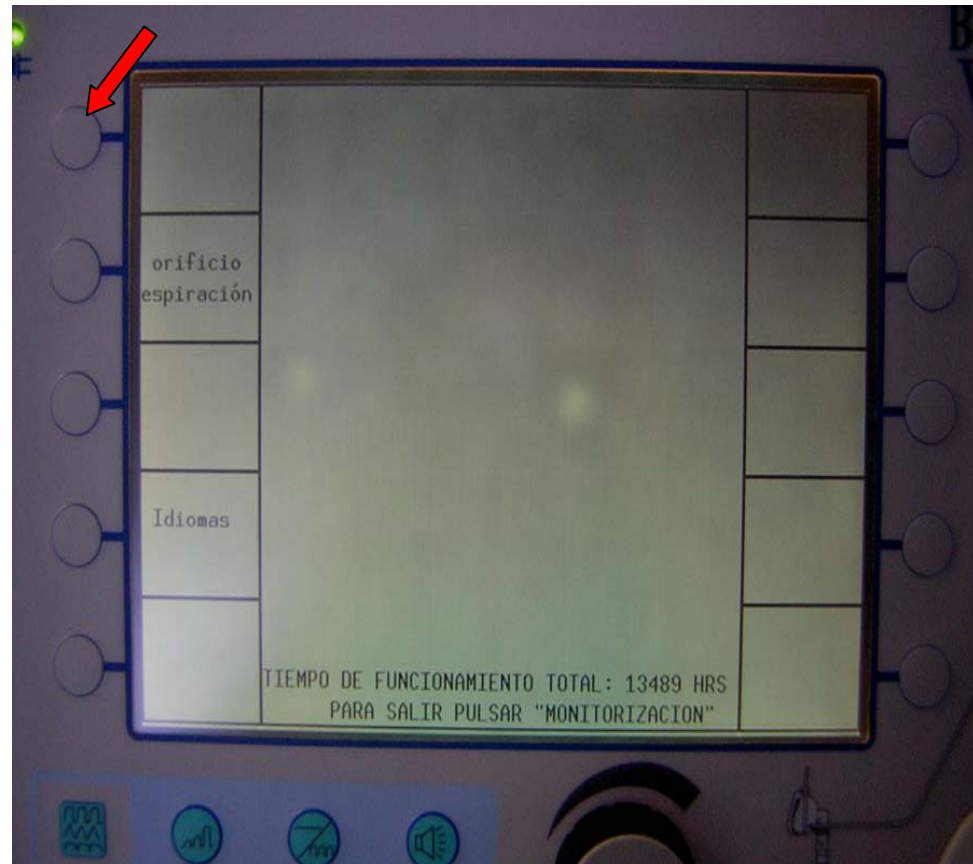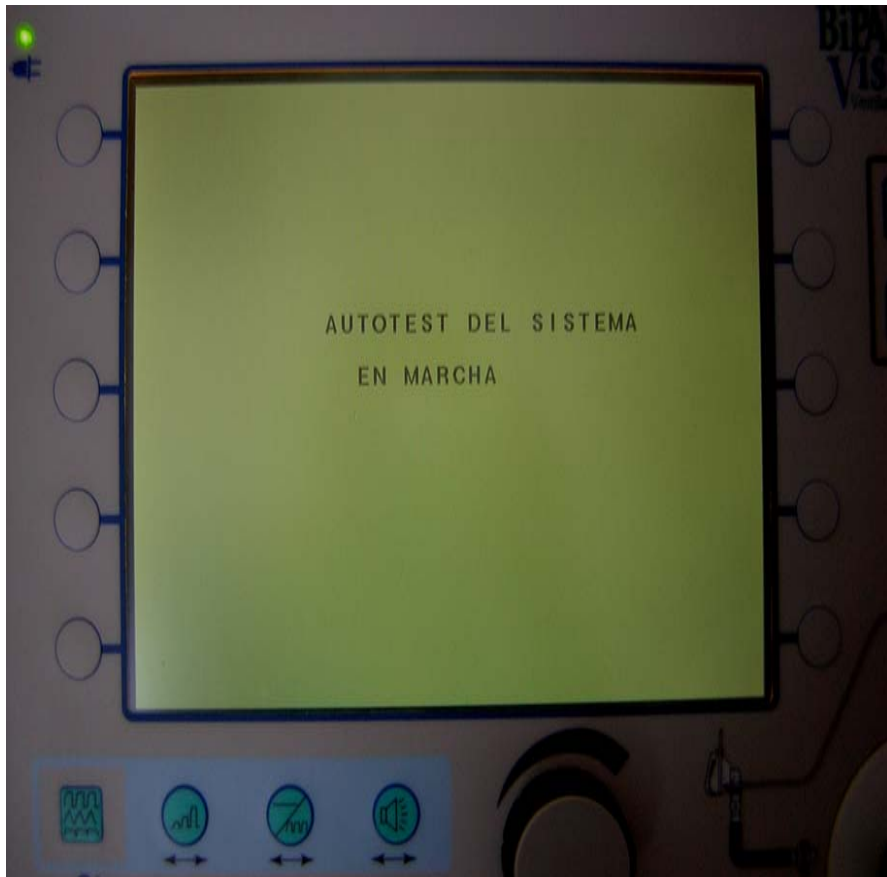

- Pulsar inicio test
- Tapar orificio espiratorio

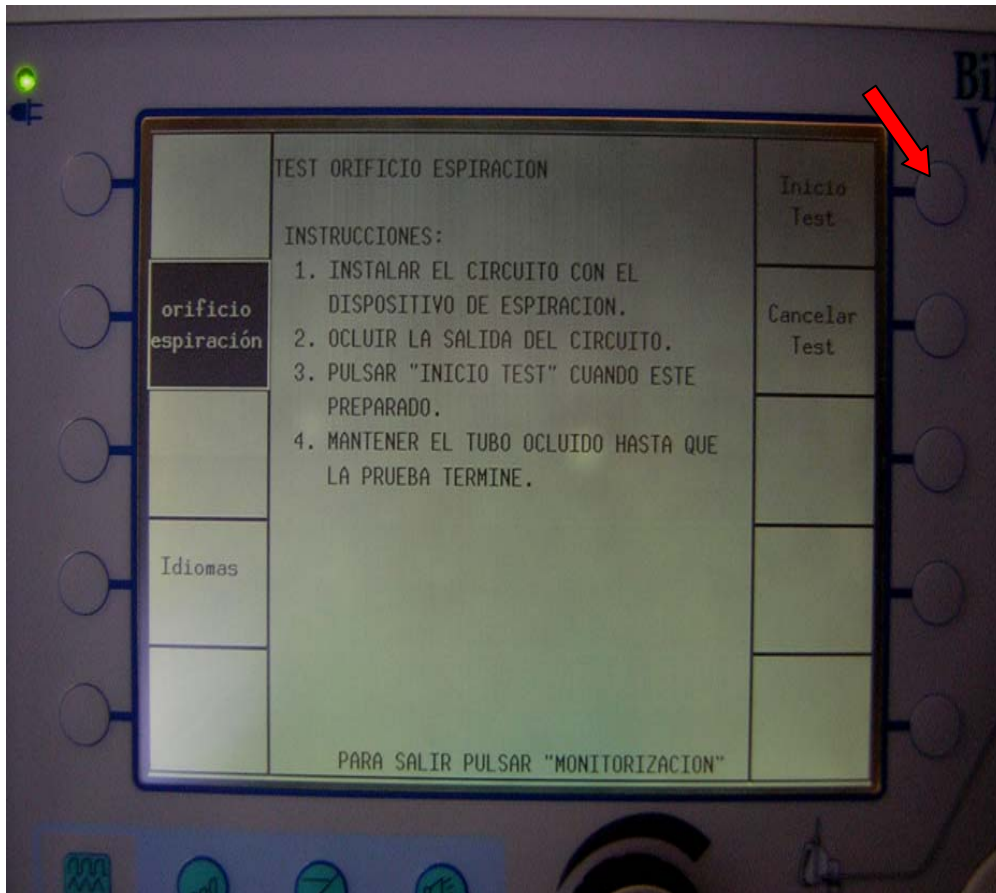

- El test se pone en marcha
- Test finalizado
- Para salir pulsar en monitorización

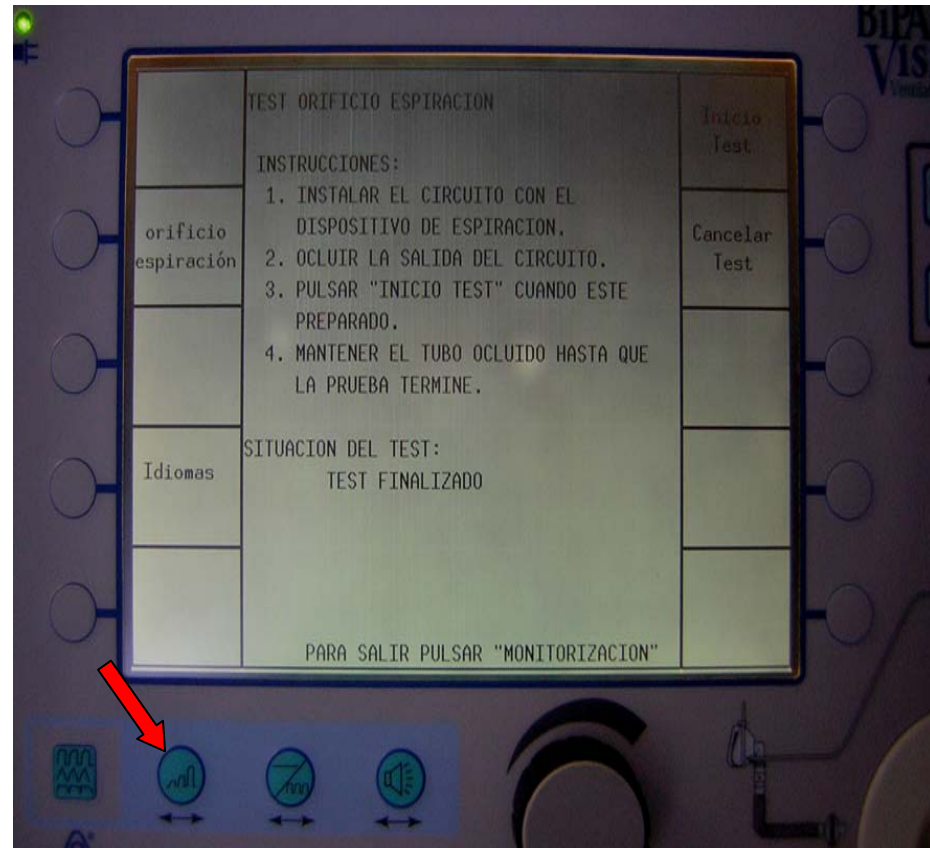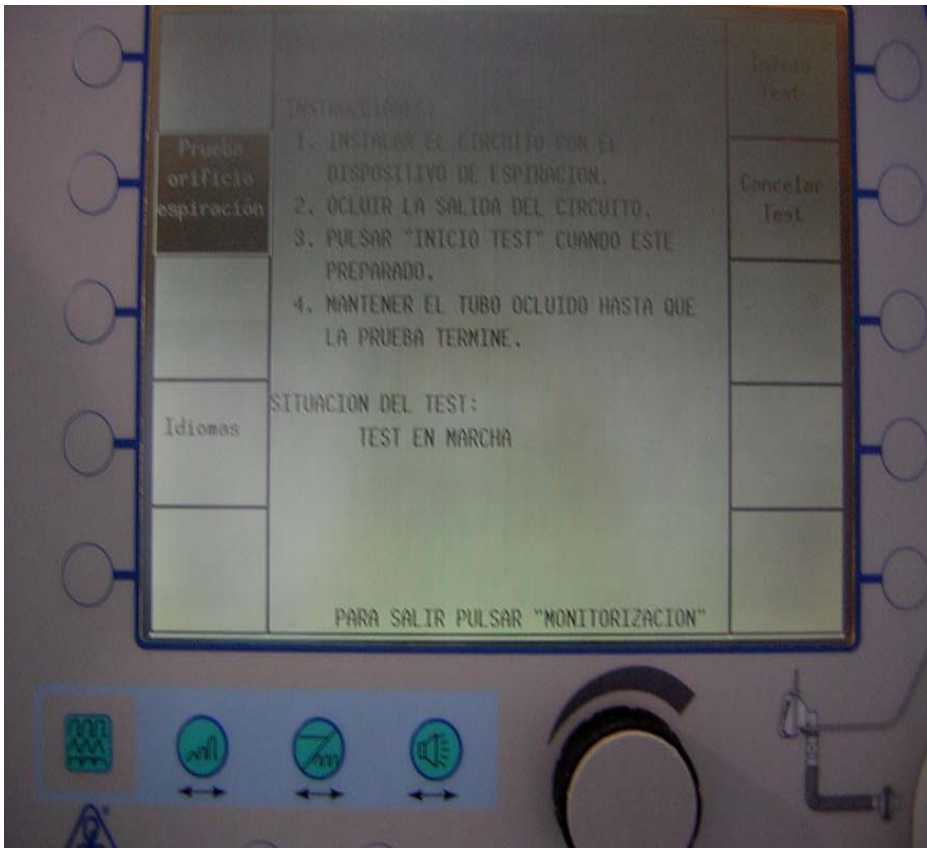

# BIPAP ST



**FILTRO**





# PIEZAS DE LA BIPAP ST



## TUBULADURA CON LA CONEXIÓN EN (T)



- Poner la conexión en (T), parte de delante
- La conexión en (T) más larga, se conecta en la parte de atrás

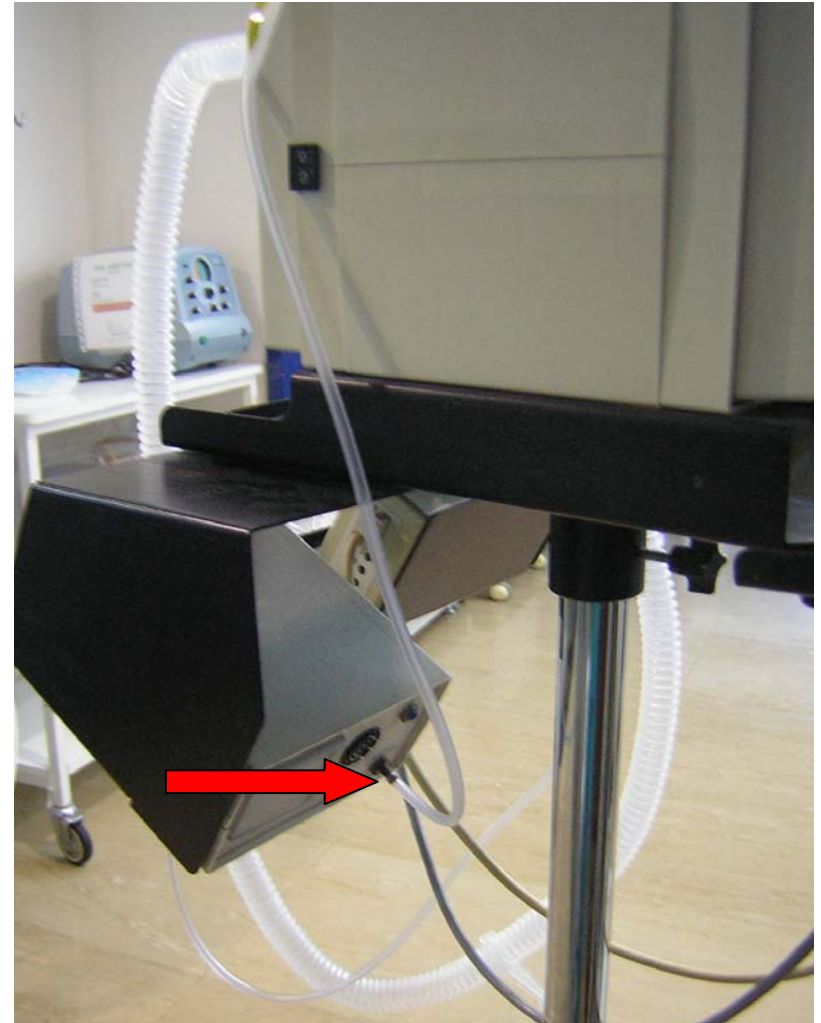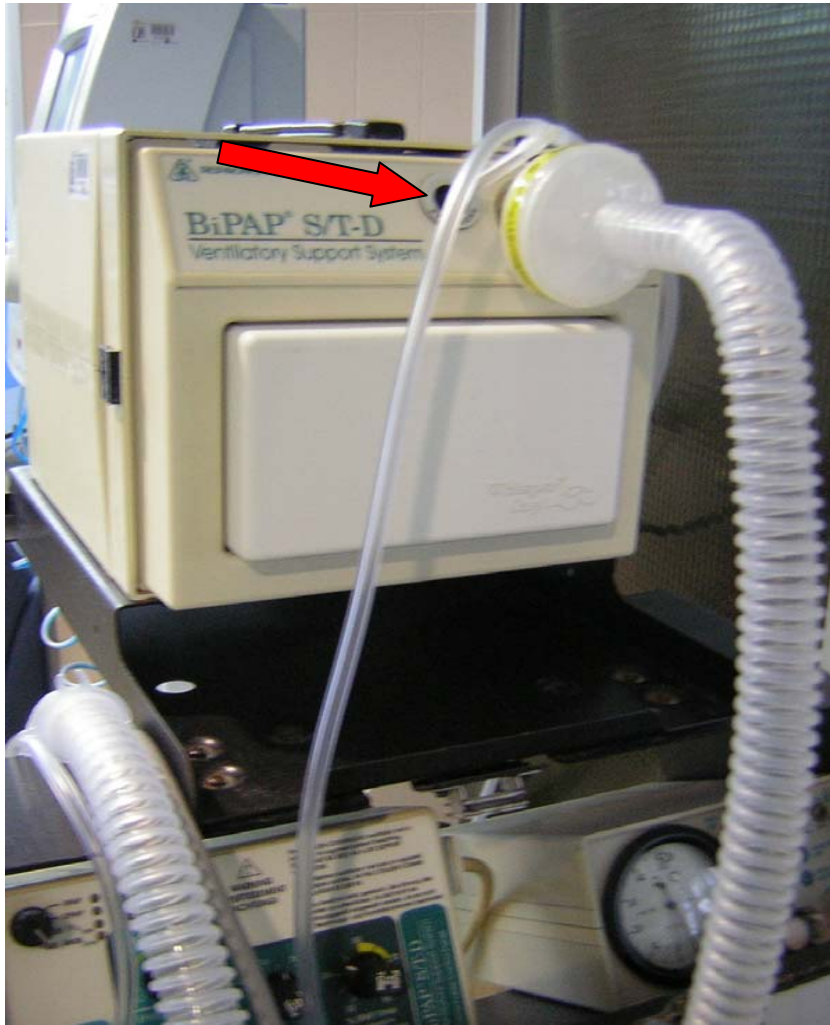

- Encender
- IPAP, EPAP, y volumen Taidal, lo programan los facultativos
- Est. Leak → son las fugas

